

## Masque FFP2 Coronavirus – Covid-19


### Masques EPI : appareils respiratoires protection particulaire

CE EN149:2001+ A1:2009


Concernant la directive R 2016 / 425 sur les équipements de protection individuels

### Fiche technique


#### 1. Dimensions:

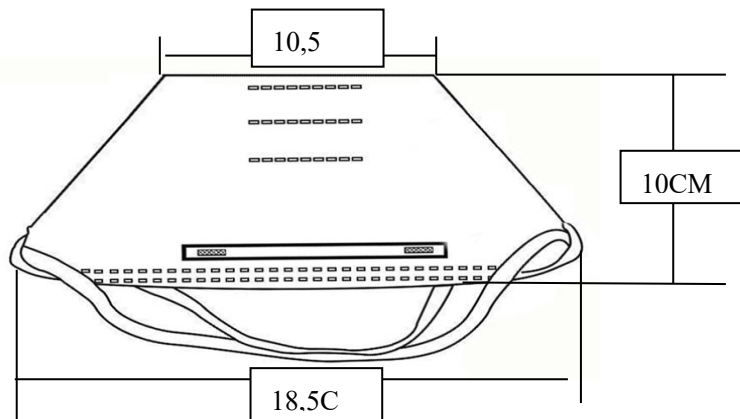

#### 2. Matière:

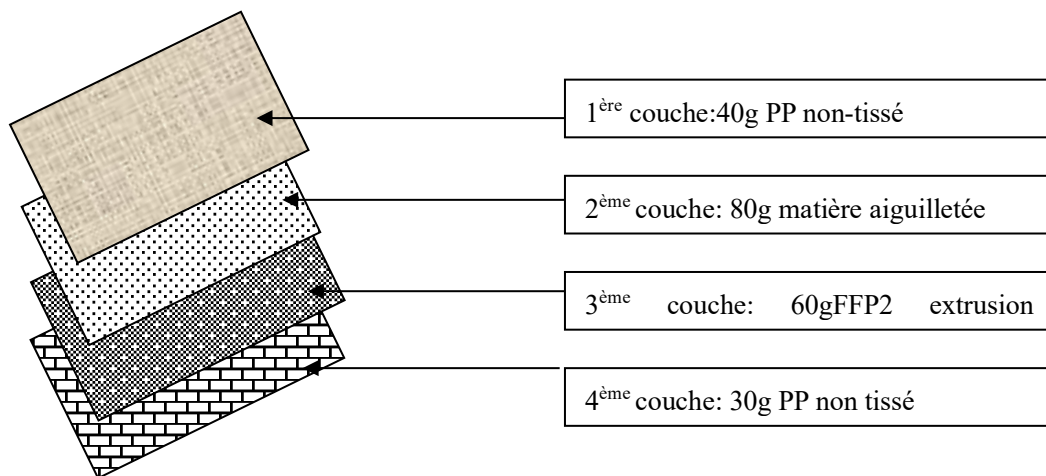

#### 3. Le masque :

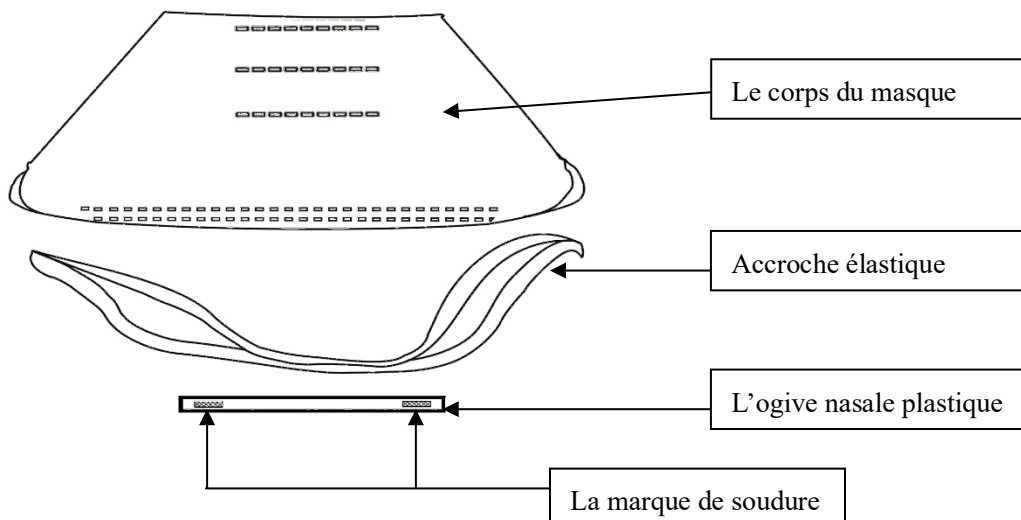


#### 4. Domaine d'application du masque

Masque destiné à protéger celui qui le porte des contaminations aériennes par inhalation. Le masque FFP2 selon la norme CE EN149:2001+ A1:2009 Concernant la directive R 2016 / 425 sur les équipements de protection individuels protège le nez et la bouche en retenant 92% des particules et bactéries dans l'air ambiant

**Le masque ne doit pas être utilisé au-delà de 8 heures, il est recommandé de changer de masque après 4 heures d'utilisation.**

**Il ne faut pas réutiliser un masque qui a déjà été porté.**

#### 5. Mode d'emploi et précaution d'emploi

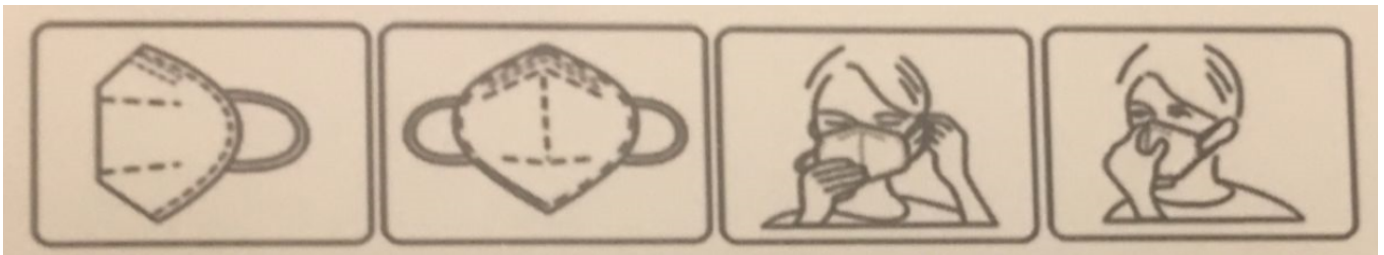

1. Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau ou un gel hydroalcoolique désinfectant pour les mains avant de toucher le masque.
2. Déterminez quel côté du masque est le haut. Le côté du masque qui a un bord pliable rigide est le haut et est destiné à se mouler à la forme de votre nez
3. Masque facial avec élastique d'oreille: Tenez le masque par les élastiques d'oreille. Placez une boucle autour de chaque oreille.
4. Mouler ou pincer le bord rigide à la forme de votre nez.
5. Tirez le bas du masque sur votre bouche et votre menton.

#### 6. Contre-indications

Ce masque n'a pas d'efficacité de protection vis-à-vis des gaz et des vapeurs (désinfectants, gaz anesthésiques...).

Ne plus toucher le masque jusqu'à enlèvement, dès la fin d'utilisation.

Le masque ne doit pas être utilisé au-delà de 8 heures, il est recommandé de changer de masque après 4 heures d'utilisation.



## 7. Informations légales

Les masques ont été fabriqués en Mars 2020 en République Populaire de Chine et importés par

WIZ' IMPORT

SARL au capital de 10 000 Euros

Siège social : 27, Avenue de l'Opéra - 75001 - PARIS

RCS PARIS B 492337449 - Siret 49233744900010 - N° TVA Intracommunautaire FR 52492337449

Ces masques sont conformes à la norme CE EN149:2001+ A1:2009 concernant la directive R-2016 / 425 sur les équipements de protection individuels et les tests de conformités ont été effectués par le certificat de conformité N° 0P200315.FRLUT25 émis par le laboratoire :

Ente certificazione macchine SRL  
Via Cà Bella 243, 40053 Valsamoggia  
Location Castello di Serravalle (Bo) Italie  
P.IVA 02604150363